

この記事のURLとQRコード

<http://james.bloten.com/product/healthcare/B01N5JTY99.html>



ピットマスクライトグレー(PITTA MASK LIGHT GRAY) 3枚入

ピットマスク

PITTA MASK

ピットマスク(PITTA MASK)

アラクス

JAN(EAN):4987009156876

商品サイズ(幅×奥行×高さ)
:130mm*20mm*230mm

原産国:日本

内容量:3枚入

材質:ポリプロピレン

ヘルス&ビューティー

リリース日:[平成30年]2018年1月5日(金曜日)
106日[約3カ月と16日]前です



(Product Descriptionより引用)

通気性が高く息がしやすいマスクです！【メディアで紹介されました！！

】・2017年1月20日【TV】白熱ライブ ビビット・2016年12月23日【TV】読売テレビ
関西情報ネットten!

この他にも話題のアイテムが盛りだくさん！ メディア掲載商品一覧はこちら <https://hands.net/special/list/I0020414>【特長】・新ポリウレタン素材をポラスフィルター技術によって立体網目構造にすることで、花粉捕集率約99%ながら、通気性が高く息がしやすいマスクです。

- ・3回洗っても花粉捕集率約99%を保ち経済的。
- ・メガネをかけたままでもメガネが曇らない仕様です。
- ・男性にもおすすめのライトグレーです。
- ・マスクは感染（侵入）を完全に防ぐものではありません。

(引用ここまで)

価格について

新品販売価格 398円

参考価格 なし

[Amazon.co.jp 価格調査日時 2018年4月21日 13時07分日本時間]

商品画像



顔型密着新素材採用 PITTA MASK ピッタマスク ライトグレー

新ポリウレタン素材って？

ボラスフィルター技術による
立体網目構造だから
花粉99%カット*を本目
(フィルター性能)
通気性が高く息がしやすい

柔らかい伸縮性のあるポリウレタン素材だから
顔に密着して花粉が侵入する**隙間をつくらない**
長時間つけても**耳が痛くならない**優しい掛け心地

洗って繰り返し使用できて
3回洗っても**花粉99%カット***を保ち**経済的**
(フィルター性能)




【使用方法】 マスクを内袋から1枚ずつ取り出します。

1 マスクの上下を解錠して、左右に広がります。



2 耳かけ部分を引っ掛けて、マスクを両耳にかかります。



3 隙間なく密着させるため軽くマスクの上から押さえます。



【使用上の注意】 ●本品は有害な物質や汚染物質が侵入する場所での使用はできません。 ●鼻下に鼻翼がある場合は、鼻翼が露れぬ場合の向きで顔面を中央に向けてください。 ●マスクを使用中、鼻当て部分が熱くなった場合には使用を中止してください。 ●乳幼児の手の届かない場所に保管してください。 ●高温多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管は避けてください。 ●ポリウレタンの性質上、変色することがありますが品質には影響ありません。 ●湿気及びアルコールの洗浄液で洗浄します。 変色する原因となりますのでご注意ください。 ●吸入量により、刺激がもたらされる場合がありますので、過剰の吸入は十分にご注意ください。 ●使用後は地方自治体の区分に基づいて捨ててください。

(一社)日本衛生材料工業連合会自主基準による表示			
品 名	マスク(商品名:PITTA MASK LIGHT GRAY)		
対 象	花粉、かぜ、ホコリ等	素 材	本体:ポリウレタン
原 数	3枚入り	包装材の材質	ポリプロピレン
販売者名	株式会社 アラクス 名古屋市千区丸の内三丁目2-26 アラクス マスク相談室 TEL.062-951-8880 【受付】9:00~16:30(土・日・祝日も除く)		





花粉・かぜ用

3枚入〔個包装〕

REGULAR レギュラーサイズ

— 顔型密着 新素材採用 ピッタ・マスク ライトグレー —

PITTA MASK

LG
LIGHT
GRAY

新ポリウレタン素材で、
花粉の侵入を徹底ガード。

| 花粉99%カットフィルター[®]・隙間をつくらない
| 息がしやすい・耳が痛くならない



ARAX

マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

