

この記事のURLとQRコード

<http://james.bloten.com/product/healthcare/B01N5JTY99.html>



ピットマスクライトグレー(PITTA MASK LIGHT GRAY) 3枚入

ピットマスク

PITTA MASK

ピットマスク(PITTA MASK)

アラクス

JAN(EAN):4987009156876

商品サイズ(幅×奥行×高さ)
:130mm*20mm*230mm

原産国:日本

内容量:3枚入

材質:ポリプロピレン

ヘルス&ビューティー

リリース日:[平成30年]2018年1月5日(金曜日)
198日[約6カ月と18日]前です



(Product Descriptionより引用)

通気性が高く息がしやすいマスクです！【メディアで紹介されました！！

】・2017年1月20日【TV】白熱ライブ

ビビット この他にも話題のアイテムが盛りだくさん！ メディア掲載商品一覧はこちら <https://hands.net/special/list/I0020414>【特長】・新ポリウレタン素材をポラスフィルター技術によって立体網目構造にすることで、花粉捕集率約99%ながら、通気性が高く息がしやすいマスクです。

- ・3回洗っても花粉捕集率約99%を保ち経済的。
- ・メガネをかけたままでもメガネが曇らない仕様です。
- ・男性にもおすすめのライトグレーです。
- ・マスクは感染（侵入）を完全に防ぐものではありません。

(引用ここまで)

価格について

新品販売価格 350円

参考価格 なし

[Amazon.co.jp 価格調査日時 2018年7月20日 16時05分日本時間]

商品画像



顔型密着新素材採用 PITTA MASK ピッタマスク ライトグレー

新ポリウレタン素材って？

ボラスフィルター技術による
立体網目構造だから
花粉99%カット*を本目
(フィルター性能)
通気性が高く息がしやすい

柔らかい伸縮性のあるポリウレタン素材だから
顔に密着して花粉が侵入する**隙間をつくらない**
長時間着けても**耳が痛くならない**優しい着け心地

洗って繰り返し使用できて
3回洗っても**花粉99%カット***を保ち**経済的**
(フィルター性能)




※花粉99%カットは試験結果

※使い後は
洗濯してください。

※1枚10センチメートル

【使用方法】 マスクを内袋から1枚ずつ取り出します。

1



マスクの上下を
確認して、左
右に返します。

2



耳かけ部分を
引っ掛けて、マ
スクを両耳に
かけます。

3



隙間なく密着
させるため軽
くマスクの上か
ら押さえます。

【使用上の注意】 ●本品は有害な粉塵や花粉が侵入する場所での使用はできません。 ●鼻下に鼻骨がある場合は、鼻骨が当たる場合の向きに使用を中止してください。 ●マスクを使用中、鼻当て部分が熱くなった場合には使用を中止してください。 ●乳幼児の手の届かない場所に保管してください。 ●高温多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管は避けてください。 ●ポリウレタンの性質上、変色することがありますが品質には影響ありません。 ●湿気及びアルコールの洗浄液で洗浄します。 変色する原因となりますのでご注意ください。 ●吸入量により、刺激がもたらされる場合がありますので、過剰の吸入は十分にご注意ください。 ●使用後は地方自治体の区分に基づいて捨ててください。

(一社)日本衛生材料工業連合会自主基準による表示			
品 名	マスク(商品名:PITTA MASK LIGHT GRAY)		
対 象	花粉、かぜ、ホコリ等	素 材	本体:ポリウレタン
原 数	3枚入り	包装材の材質	ポリプロピレン
販売者名	株式会社 アラクス 名古屋市千区丸の内三丁目2-20 アラクス マスク相談室 TEL.052-951-8880 【受付】9:00~16:30(土・日・祝日も除く)		



4 987009 156876




花粉・かぜ用

3枚入〔個包装〕

REGULAR レギュラーサイズ

— 顔型密着 新素材採用 ピッタ・マスク ライトグレー —

PITTA MASK

LG
LIGHT
GRAY

新ポリウレタン素材で、
花粉の侵入を徹底ガード。

花粉99%カットフィルター[®]・隙間をつくらない
息がしやすい・耳が痛くならない



ARAX

マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

