

この記事のURLとQRコード

<http://james.bloten.com/product/healthcare/B078JJ5WYX.html>



【お試し】めぐりズム 蒸気の温熱シート 肌に直接貼るタイプ 1枚入

めぐりズム

花王グループカスタマーマーケティング株式会社

JAN(EAN):4901301345110

肌に直接貼るタイプ

商品サイズ (幅×奥行×高さ)
:139mm×125mm×95mm

内容量:1枚入

一般医療機器

医療機器届出番号:13B3X00134000008

ヘルス&ビューティー

リリース日:[平成30年]2018年1月5日(金曜日)

111日[約3カ月と21日]前です



価格について

新品販売価格 9999円

参考価格 なし

[Amazon.co.jp 価格調査日時 2018年4月24日 12時02分日本時間]

商品画像

——安全にお使いいただくため、以下のご注意をお守りください。——

● 幼小児、身体の不自由な方、認知症の方等がお使いになる場合には、まわりの方も充分ご注意ください。

低温やけど防止のためのご注意

- 熱すぎると感じた場合は、すぐに使用を中止する ● 就寝時には使わない
- 粘着部分がシワになったり、発熱体が重なり、シートが浮いたりはがれたりしないように貼る ● シートを貼った部位を部分的に強く圧迫しない
- シートを貼った部位を電気毛布、こたつ、ストーブやカイロ等で温めない

使用上のご注意

- かゆみを強く感じたり、その他身体に何らかの異常を感じた場合は、すぐに使用を中止する ● 次の場合は、その後の使用を中止し、医師に相談する(使用を続けると、症状が悪化することがある)
- (1) 使用中、急に痛みが強くなった場合
- (2) 赤みやかゆみ等が消えない場合
- (3) 湿疹、かぶれや低温やけど等が現れた場合
- (4) 腫痛等患部の症状が悪化した場合
- シートが破れて内容物が皮膚に触れた場合は、洗い流すか、ぬれた布でふきとる。目に入った場合は、こすらずすぐに充分洗い流す。異常が残る場合は、医師に相談する ● 毎日使う場合は、貼る位置をずらす(肌への負担を減らす) ● 同じ部位には1日1回の使用を限度とする
- * 温熱効果で血行がよくなるので、一時的に使用部位が赤くなり、かゆみを感じたりすることがあります。

取扱い上および保管上のご注意

- シートを切ったり、もんだり、無理に変形させたりしない ● 破損したシートは使用しない ● 発熱が終了したシートは再使用できない ● 電子レンジで加熱しない ● 地域のルールに従い、冷めてからごみに出す ● 幼小児、認知症の方等の手の届かないところに保管する ● 直射日光や気温の高いところ、熱源(こたつ、パソコンの上など)をさけて保管する

使い方

- 1 袋からシートを取り出したらすぐに、**肌**に直接貼る
 - 2 発熱が終わったら、シートを**弱**から**少**しずつ**ゆ**っくりはがす
- 髪の毛を巻き込まないように注意する ● 汗や水分を拭き取った乾いた肌に、必ずフィットするように貼る ● 何度も貼りなおすと、はがれやすくなる ● 温度と持続時間は、使用環境によって変わることがあります。



使用前のご注意

次の方は使用しないでください

- 温熱で湿疹やじんましんが出る方
- 温感が低下している、または温度に敏感な方 ● ぼんそうこう等の刺激に弱い方、かぶれた経験のある方 ● 自分の意思ですぐにはがすことができない方

次の部位には使用しないでください

- 打ち身、ねんざ等による熱・腫れ等の炎症部位 ● 粘膜、顔(目のまわり等) ● 切り傷、すり傷、虫刺され等がある部位 ● 湿疹、かぶれ等がある部位 ● 貼り薬や塗り薬等を使用している部位 ● ひざの裏側等、シートがシワになりやすい部位

次の方は医師または薬剤師にご相談ください

- 医師の治療等を受けている方 ● 糖尿病の方、血行障害がある方 ● のぼせやすい方 ● 発熱している方、炎症性疾患のある方 ● 薬や化粧品等でアレルギー症状(発疹、発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある方 ● 妊娠中の方

シート構成材料 表面材: ポリプロピレン
発熱体: 鉄粉含有

● ぬくろふは花王の商標です。
Steam Thermo Patch
Made in Japan



切り口

快温 約40℃
温度
5~8時間

めぐりズム
MegRhythm

1枚入
肌に直接
貼るタイプ

蒸気の温熱シート

血行促進・痛みの緩和 医療機器の温熱効果

慢性の肩こり・腰痛をほぐす

じ〜んわり
心地よい蒸気の
温熱が患部に効く



イメージ図 蒸気は目に見えませんが

【効果】 温熱効果

1. 血行をよくする
2. 筋肉のこりをほぐす
3. 筋肉の疲れをとる
4. 関節の動きを活発にする
5. 神経痛、筋肉痛の痛みの緩和
6. 疲労回復

【患部に直接貼り、温める医療機器】

心地よい蒸気の温熱で患部を深く、温めます。

- 快温温度約40℃が5~8時間持続。
- 肌あたりがやさしい蒸気。衣類はぬらしません。
- ニオイがないので外出時でも使いやすい。
- おなかにあてると、胃腸の動きを活発にします。

2015年4月（第2版）
製造番号 1383X00134000008
販売 株式会社「株式会社カオ」
JANコード 71019000
*一度使用したシートは、再使用できません。

一般医療機器
販売名 めぐりズム 蒸気の温熱シートa1
【病室に関するお問合せ・ご意見は 0120-165-696】
花王株式会社 〒133-8270 東京都中央区東日本橋1-14-0



切り口